



OEDEEMMANAGEMENT MET JOBST

Voor vrouwen met lymfoedeem bij gynaecologische kanker

IN NEDERLAND KRIJGEN RUIM 4.800 VROUWEN PER JAAR GYNAECOLOGISCHE KANKER*

Lymfoedeem is een onderschat probleem tijdens en na de behandeling van een vorm van deze ziekte.

De combinatie van het **oncologisch behandeltraject** en de **klachten die de vrouw ervaart**, vormen het uitgangspunt voor het stellen van **reële doelen** binnen de compressietherapie die wordt aangeboden. En dus ook voor de keuze voor **het juiste compressiemiddel van JOBST** dat meehelpt aan de realisatie van deze doelen.

*Olijf, Webinar: Late gevolgen en nieuwe ontwikkelingen bij gynaecologische kanker





HET STELLEN VAN REËLE DOELEN

Door uit te gaan van de
juiste informatie én wat de
patient aankan

ALLES BEGINT MET..

Een compleet beeld van de situatie van de patiënt

Inzicht in het oncologisch behandeltraject en een goede overdracht vanuit het ziekenhuis geeft een beter beeld van de situatie van de patiënt. Deze informatie is essentieel voor het formuleren van reële doelen binnen de compressietherapie.

WANNEER IS EEN DOEL REËEL?

STADIUM LYMFOEDEEM

Oedeemcontrole met JOBST dag- en nachtcompressie

Afhankelijk van de procedure die is gevolgd en de klachten die de patiënt ervaart, kies je voor een compressiehulpmiddel.


Hoe beter de voorziening is afgestemd op de klachten, hoe groter de kans dat het doel van de compressietherapie kan worden gerealiseerd.

Een compressiehulpmiddel gedurende de nacht geeft een betere oedeemcontrole wanneer dit wordt gecombineerd met een compressiehulpmiddel voor overdag. JOBST producten zijn onderling uitstekend te combineren.

De oplossing zit hem vaak in een combinatie van behandelingen

De meest voorkomende behandelingen (manuele lymfedrainage en oefentherapie) worden gecombineerd met compressie. JOBST biedt een breed assortiment dat ingezet kan worden afhankelijk van de locatie en de fase waarin het oedeem zich bevindt:



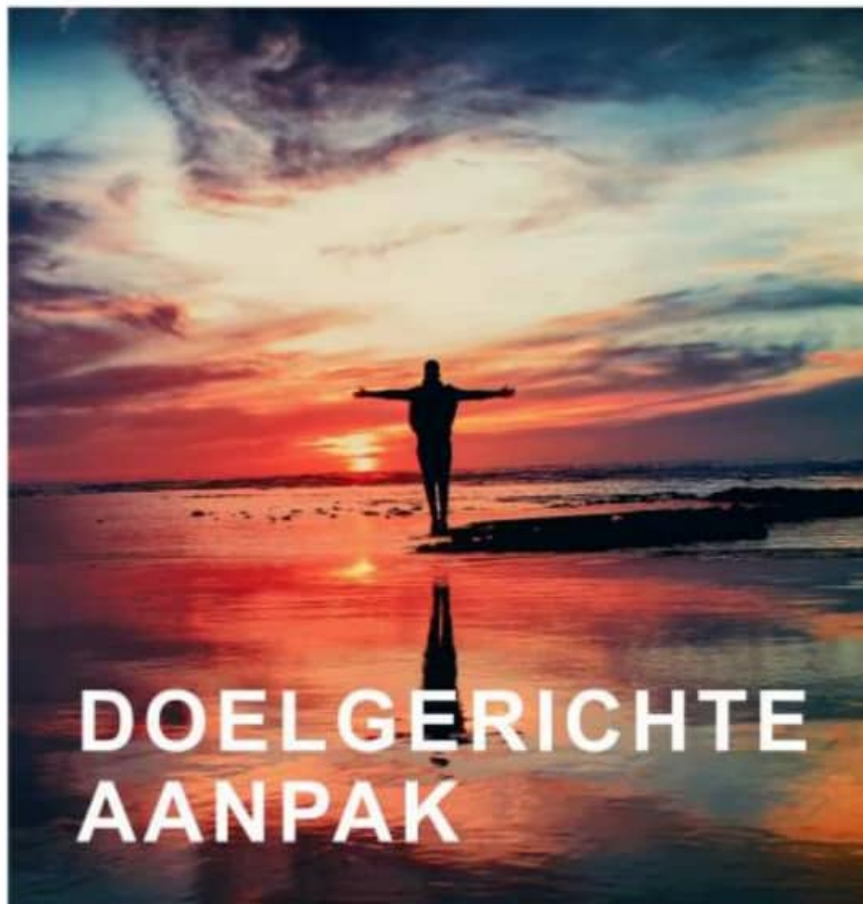

DOELGERICHTE AANPAK

JOBST JoViPak voor 's nachts

JOBST JoViPak nachtcompressie is speciaal ontworpen om **comfort te bieden** aan vrouwen die lymfoedeem en/of fibrose hebben ontwikkeld **bij gynaecologische kanker**.

Jovipak biedt de mogelijkheid om het oedeem sneller te stabiliseren. Hierdoor neemt ook de motivatie om dagcompressie te dragen vaak toe.

Doordat nachtcompressie niet onzichtbaar hoeft te zijn, kan een groter gebied tegelijk behandeld worden.

JOBST JOVIPAK

JOBST JOVIPAK MAATWERK BOXER

- Voor vrouwen met heup-, gluteaal of genitaal oedeem
- Kan met een JoViPak beenbandage gecombineerd worden
- Combineer met een JoviJacket voor extra compressie



JOBST JOVIPAK GENITALE PAD VROUW

- Voor vrouwen met oedeem en/of fibrose in de schaamlippen en/of de liezen.
- Ontworpen om tegelijkertijd een hysterectomielitteken te kunnen bedekken.
- In meerdere maten verkrijgbaar



JOBST JOVIPAK KIDNEY PADS

- De kidney pad is zeer geschikt voor het pubis-gebied
- Kan onder een therapeutische elastische kous gebruikt worden
- Ook geschikt om overdag te dragen
- In meerdere maten verkrijgbaar





JOBST Elvarex voor overdag

De JOBST Elvarex Bermuda is **zeer geschikt voor vrouwen met lymfoedeem en/of fibrose in stadium ISL 2a tot en met ISL 3 bij gynaecologische kanker.**

Afhankelijk van de mate van het oedeem en de persoonlijke voorkeuren van de patiënt kan de Elvarex bermuda ook worden gecombineerd met andere compressiehulpmiddelen:

- Elvarex (soft) AG kousen
- Jovipak pads

JOBST ELVAREX

JOBST Elvarex bermuda

De Elvarex Bermuda is een dagcompressie-hulpmiddel en zeer geschikt voor de behandeling van lymfoedeem bij gynaecologische kanker. Verkrijgbaar in een ruim assortiment van neutrale kleuren en met diverse opties*.



*ook beschikbaar met Elvarex kruisstukje voor meer stevigheid (optie in opmerkingveld)



HULP BIJ KIEZEN

Alle productinformatie die je nodig hebt bij de keuze voor de juiste compressievoorziening

- Thema gerelateerde brochure
- Vlakbrei brochure





HET BEST HAALBARE RESULTAAT

Door het zo goed mogelijk
aanmeten van
vlakbreikousen

NIETS HOUDT JE TEGEN



JOBST AANMEETRICHTLIJNEN

Hulpmiddel voor het aanmeten van vlakbreikousen

Maten opnemen voor vlakbreikousen kan een hele uitdaging zijn. Tijdens het proces moet immers rekening worden gehouden met tal van aspecten.


Wij willen dat proces graag vereenvoudigen en jou zo goed mogelijk ondersteunen door middel van deze gestandaardiseerde aanmeetrichtlijnen. Op deze manier streven we samen naar een compressiekous die meteen zo goed mogelijk past.



JOBST AANMEETRICH LIJNEN

JOBST vlakbrei
compressiekousen op maat

- Voor Elvarex, Elvarex Soft, Elvarex Soft Seamless, Elvarex Plus en Confidence
- In de loop van Q1 beschikbaar via [Downloads \(jobst.nl\)](https://www.jobst.nl/downloads)

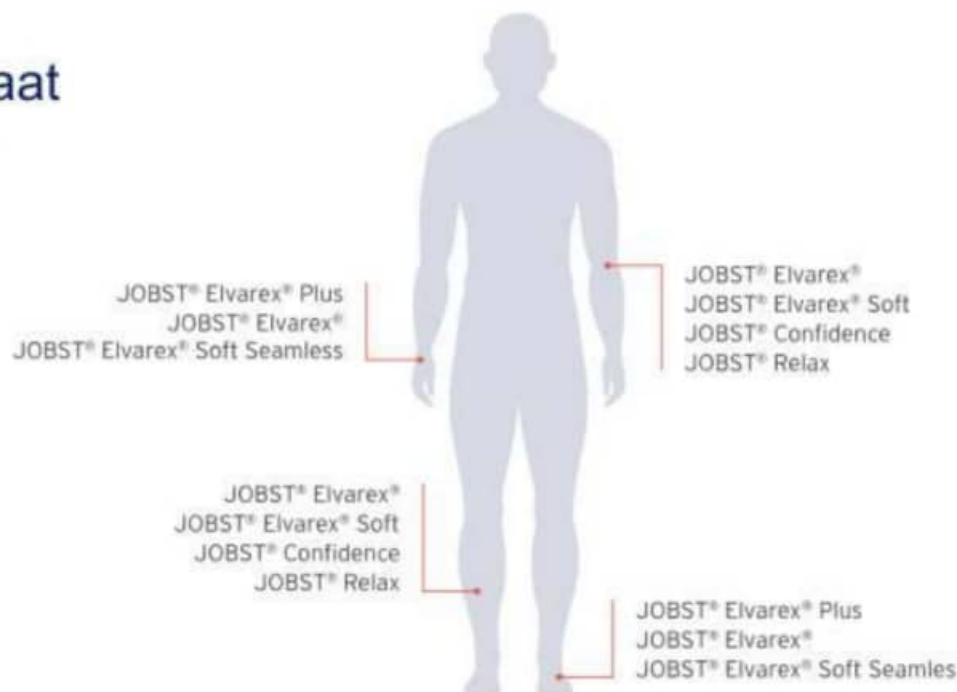

BINNENKORT

Escaperoom - kennis en vaardigheden opdoen over lymfoedeem aan de onderste extremiteiten

Een nieuw assortimentsoverzicht

Inspiratiesessie over oedeemmanagement bij vrouwen met gynaecologische kanker



THANK YOU